



powered by 

INTERVALL-HYPOXIE-HYPEROXIE-NORMOXIE-THERAPIE

Die Zukunft der Regeneration in Deiner Praxis mit dem
CellAirOne

WAS MACHT DIE IHHNT?

Die Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Normoxie-Therapie (IHHNT) ist ein modernes, nicht-invasives Verfahren, das auf der gezielten Beeinflussung des Sauerstoffgehalts in der Atemluft basiert. Diese Methode nutzt die natürliche Anpassungsfähigkeit des Körpers an wechselnde Sauerstoffbedingungen, um die Zellfunktion zu optimieren und den Organismus zu stärken.

Die gezielten Wechsel zwischen Hypoxie, Hyperoxie und Normoxie aktivieren die zelluläre "Trainingsantwort", ähnlich wie bei einem körperlichen Ausdauertraining, jedoch ohne die Belastung von Muskeln oder Gelenken.

Das ZELLTRAINING kombiniert dabei die moderne medizinische Technologie mit natürlichen physiologischen Anpassungsmechanismen. Es bietet ein breites Spektrum an positiven Effekten, von der Prävention bis zur Behandlung chronischer Erkrankungen, und ist eine effektive Methode zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden, die aus personalisierten Behandlungen mit individuellen Behandlungsplänen hervorgeht.

Die Zukunft der Therapie
IST DA!



DER CELLAIRONE


POWERED BY  aconcept

Bequem liegend und rundum versorgt bietet Dir **TUR** mithilfe des **CellAirOne** ein Training, welches Dich aus deinen Tagesroutinen rausholt und Dir die Vitalität für den Alltag zurückgibt. Nicht selten empfinden Patientinnen und Patienten dieses als tief entspannend und schlafen während Sitzungen teilweise sogar ein.

Das Sauerstofftherapiegerät CellAirOne von TUR arbeitet mit kurzen, kontrollierten Intervallen, wobei das hypoxische Gasmisch einen Sauerstoffgehalt von mindestens 9 % aufweist. Die kurzen und kontrollierten Intervalle mit mäßiger Hypoxie führen zu einer Art mäßiger Belastung, die sich nicht nur vorteilhaft auf die Leistungsfähigkeit, den Stoffwechsel, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Behandlung chronischer Erkrankungen, sondern auch auf Anliegen wie Burnout oder Stressresistenz auswirken kann.

DER CELLAIRONE

POWERED BY  aconcept

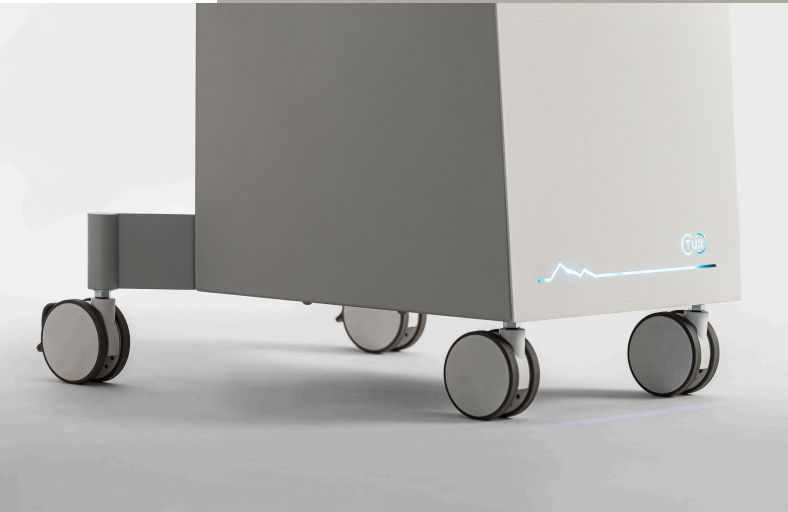

Der rollbare und stabile Gerätewagen verfügt über ein kompaktes und übersichtliches Design.

Die saubere Kabelorganisation durch seitliche Öffnungen und die beidseitige Halterung für das Zubehör sorgen während der Behandlung für Ordnung und tragen so zur gelassenen Atmosphäre mit bei.



Das hochauflösendes 12,1 Zoll-Farbtouchdisplay ermöglicht einen Einblick in die Behandlungsprotokolle aller Patienten und verschafft während der Therapie einen schnellen Überblick.

Das in Deutschland hergestellte Medizinprodukt CellAirOne eignet sich somit perfekt für die Intervall-Hypoxie-Hyperoxie-Therapie.

DIE ZAHLEN

SPRECHEN FÜR SICH!

Um das Leistungsverhältnis darzulegen, zeigt der CellAirOne, wo Technologie auf Gesundheit trifft - einfach, sicher und effektiv!

BETRIEBSBEDINGUNGEN

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Umgebungstemperatur | +15 °C bis +30 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | Bis 15 % bis 60 % (nicht kondensiert) |
| Luftdruck | 700 hPa bis 1000 hPa |
| Wartung | Siehe Benutzerhandbuch |

TRANSPORT- UND LAGERBEDINGUNGEN

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Temperatur | -10 °C bis +40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 95 % (nicht kondensiert) |
| Luftdruck | 500 hPa bis 1060 hPa |

NETZANSCHLUSS

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Maximale Leistungsfähigkeit | 600 VA |
| Hauptspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Sicherungen | 2 x T6, 3L250V |
| Schutzklasse | Schutzklasse 1 |
| Netzschalter nach IEC 601-1 | Ja |

ENTWURF

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 500 x 460 x 1027 cm |
| Gewicht | 47 kg |
| Bildschirmgröße (Diagonale) | 12,1 " |
| IP-Code | EN 60 529 IP 30 |

KLASSIFIZIERUNG

| | |
|---------------------------|--------|
| Angewandter Teil | Typ BF |
| Klasse nach MDD 93/42/EWG | IIa |

PARAMETER

| | |
|---------------------------------|--|
| O ₂ -Bereich 9 | 9 % bis 18 % (Hypoxie), 36 %+ 1 % (Hyperoxie) Umgebung (Normoxie) |
| SpO ₂ | 70 % bis 99 % |
| Zeiteinstellungen für Hyperoxie | 1 bis 60 Minuten |
| Zeiteinstellungen für Hypoxie | 1 bis 60 Minuten |



Das Training besteht aus **drei Phasen**, die während einer Behandlungseinheit abwechselnd eingesetzt werden:

1.Hypoxie-Phase:

In dieser Phase wird die Sauerstoffkonzentration in der Atemluft reduziert (z. B. 10–15 % O₂ im Vergleich zu 21 % in der normalen Luft). Diese kontrollierte Sauerstoffunterversorgung simuliert die Bedingungen in großer Höhe und regt den Körper an, Anpassungsprozesse zu aktivieren.

2.Hyperoxie-Phase:

Hier wird dem Körper eine erhöhte Sauerstoffkonzentration (z. B. 30–40 % O₂) zugeführt. Diese Phase dient dazu, die Zellen mit Sauerstoff zu sättigen und den Energiestoffwechsel zu fördern.

3.Normoxie-Phase:

Diese Phase entspricht der normalen Sauerstoffversorgung der Umgebungsluft (ca. 21 % O₂) und dient als Regenerationszeit.

Seit 1904 besteht TUR als deutscher Entwickler von Medizingeräten. Dazu gehört ebenfalls der CellAirOne, welcher für die IHHNT eingesetzt wird. Medizinisch zugelassen (MDR) erfüllt das Gerät die medizinischen Richtlinien (MDD) und bietet durch diese Zertifizierung einen hohen Qualitätsstandard. Somit gewährt TUR Dir und Deinen Kunden ein sicheres Verfahren deutscher Qualität, welches sich mobil und leicht in Dein Praxismodell integrieren lässt!

MACH DEINE KUNDEN ZU ÜBERFLIEGERN!

Zelltraining für Physiotherapie und Reha


- kann Regeneration & Rehabilitation bei Verletzungen beschleunigen
- mögliche Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit (besonders für Sportphysiotherapeuten)
- Unterstützung bei chronischen Erkrankungen & Fatigue-Syndromen (auch Long COVID und Burnout)
- passive Therapieform für Patienten mit Bewegungseinschränkungen (besonders in der geriatrischen Physiotherapie)
- wirtschaftlicher Vorteil & Wettbewerbsvorteil (neue Patientengruppen, geringe laufende Kosten, kombinierbar mit anderen Therapieformen)

Zelltraining für Ärzte

- wissenschaftlich fundierte Therapie mit breitem Einsatzspektrum
- Förderung der mitochondrialen Gesundheit
- nicht-invasiv, risikoarm und patientenfreundlich
- attraktive Ergänzung für die Praxis (geringe Investitionskosten bei hoher Wirtschaftlichkeit, neue Patientengruppen, Synergieeffekte mit anderen Therapieformen, moderne und innovative Medizin mit Wettbewerbsvorteil)

So vielfältig einsetzbar wie er ist, spricht der CellAirOne eine Vielzahl von Zielgruppen an, um mit ihnen auf Zellebene Energie zu tanken.

**ER IST EIN
ALLROUNDER!**

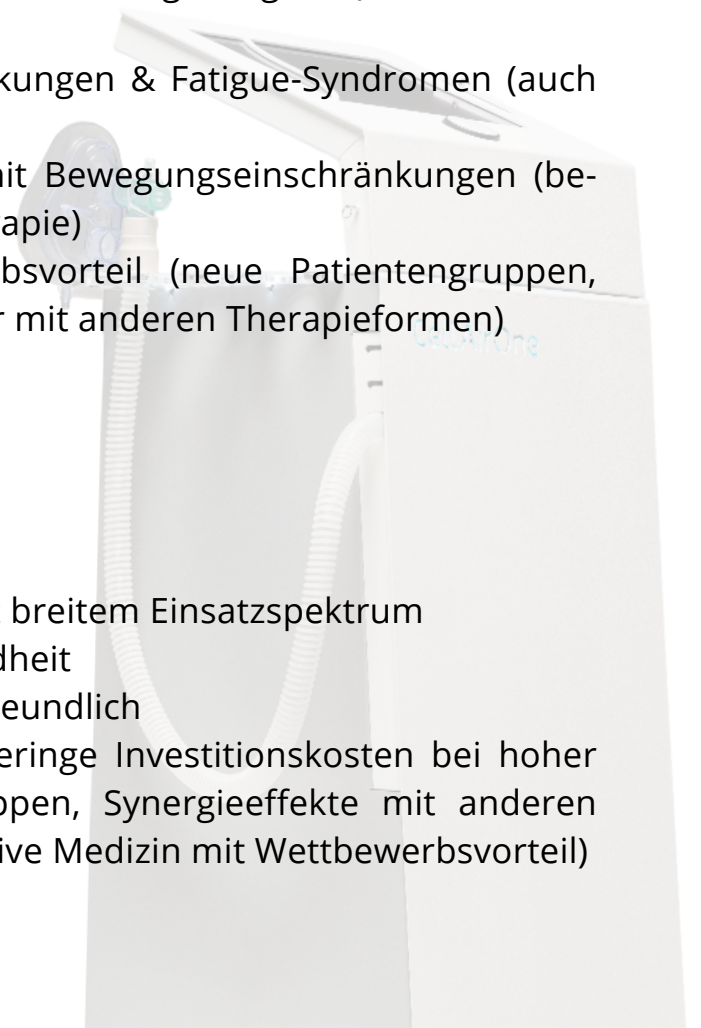



DA IST FÜR ALLE WAS DABEI!

Zelltraining für Fitness und Gesundheit

- fördert die Leistungssteigerung & Muskelregeneration – ohne zusätzliches Training
- Unterstützung beim Muskelaufbau & Gewichtsmanagement (IHHNT fördert den Muskelstoffwechsel, die Fettverbrennung und den Sauerstofftransport)
- bekräftigt optimale Regeneration & Anti-Aging-Effekt durch erhöhte Zellenergie & Kollagenproduktion
- Gesundheitsförderung & Prävention – neue Zielgruppen erschließen
- Wettbewerbsvorteil & wirtschaftliche Attraktivität (innovative & exklusive Zusatzleistung, Ergänzung zu individuellen Trainingsplänen, kombinierbar mit bestehenden Angeboten)

Zelltraining für Heilpraktiker

- regt die Stärkung der Selbstheilungskräfte & ganzheitliche Regeneration an
- bietet effektive Unterstützung bei chronischen Erkrankungen
- Entgiftung & Stoffwechsoptimierung (ideale Ergänzung bei Schwermetallausleitungen, Fastenkuren und Darmsanierungen)
- sanfte & natürliche Therapie – ideal für Heilpraktiker-Konzepte (IHHNT harmoniert hervorragend mit Homöopathie, Akupunktur, Phytotherapie oder Mikronährstoffmedizin)
- wirtschaftliche Vorteile für die Praxis (neue Patientengruppen, höhere Erfolgsraten & Patientenzufriedenheit, einfache Integration – IHHNT benötigt wenig Zeit & Personalaufwand)

ZELLTRAINING KANN JEDER!

Das **ZELLTRAINING** wird somit bei einer Vielzahl von Anwendungsfeldern mit entsprechenden Beschwerden und Zielen eingesetzt:

Leistungssteigerung, chronischer Erschöpfung, Stoffwechselstörungen, Longevity, Stressbewältigung und Rehabilitation



Das Training ist optimal für die physikalische Therapie geeignet und bietet eine gezielte Unterstützung im Berufsalltag mit professioneller Ausstattung. So kann **jedermann** die Kraft der Regeneration erleben!



WENN DAS NICHT WIE
FÜR DICH GEMACHT IST!

WIR MACHEN DICH GEMEINSAM FIT!

After-Sales-Service, Schulungen, Online-Akademie, Vor-Ort-Präsenz, Marketingunterlagen, Social-Media-Unterstützung, Präsentationen und Vorträge - alles vorhanden, nutze unser gemeinsames Potential!

Wenn Du jetzt bereits begeistert von unserem Angebot bist, aber Zweifel an Deiner eigenen Repräsentationsfähigkeit hast und Dich noch nicht vollständig auf diese neue Erfahrung einlassen kannst, dann haben wir jetzt das Richtige für Dich!

Fehlen Dir Ideen, wie Du Deine Zielgruppen erreichen kannst? Dann erhältst Du unsere Unterstützung mithilfe von Anregungen bezüglich Gestaltung, Design und Inhalten in Form von Patientenflyern, RollUps, etc...

Gerne helfen wir mit einem einheitlichen und professionellem Corporate Design, welches Dich sowohl in Print-, als auch in den digitalen Medien repräsentiert und die Werte deines Unternehmens in die Welt der Gesundheit weiterträgt.



Wir wollen mit Dir zusammenarbeiten und stehen bei Fragen immer zur Verfügung. Lass uns gemeinsam durchstarten und dich mit der IHHNT und mit unserem Angebot ganz groß rausbringen!

WIR MACHEN DICH GEMEINSAM FIT!

Passend dazu erhältst Du von uns ebenfalls:



Präsentationen für Dich und Deine Praxis mit wertvollen Informationen zu Kundenkommunikation, Zielgruppen und PraxTV



Checklisten zur Vor- und Nachbereitung der Therapieeinheiten für Dich und Deine Patienten



Showcases mit multiplen Modellen einer möglichen IHHNT- Praxisinklusion



Broschüren und Flyer, welche Dich inspirieren können

ATME MIT UNS AUF!

Wie Du merkst, stehen wir Dir von Anfang an zur Seite und versorgen Dich in jeglicher Form bestmöglich mit Infomaterial und Anregungen. Gemeinsam können wir **ZELL-TRAINING** in deiner Einrichtung etablieren.

Genieße unsere rundum Unterstützung und sichere Dir ein spitzenmäßiges Angebot, welches frischen Wind in Dich und Dein Praxisleben bringt!

WILLST DU AUCH MEHR?!

Wenn auch Du Top-Features für Deine Praxis willst, dann kontaktiere uns und frage nach einem ersten Beratungsgespräch:

zelltraining@aconcept.org

www.zelltraining-ihht-potsdam.de

+49 (0) 171 2817195 (WAPP)

Wir sind deine Beratungsmanufaktur!

www.aconcept.org



Mit Deiner IHHNT bist Du übrigens nicht alleine, denn aconcept bietet Dir unterstützend:

- Online-Schulung und Vor-Ort-Coaching
- regionale Online-Marketing-Kampagne mit Leitfaden zum Erfolg
- Rentabilitätsprognose, die auf Region und Geschäftsmodell zugeschnitten ist
- Nachbetreuung zur Sicherung eines langfristigen Erfolgs
- Zugang zu IHHNT-Spezialisten für ein tieferes Verständnis der Therapie
- Nachbetreuung zur Sicherung eines langfristigen Erfolgs